

# Инструкция

по применению набора для иммунохроматографического выявления метамфетамина в объектах таможенного досмотра (в порошках, таблетках, в смывах, растворах и других объектах исследования)  
**(ИммуноХром-МЕТАМФЕТАМИН-Экспресс)**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный набор предназначен для обнаружения МЕТАМФЕТАМИНА в объектах таможенного досмотра (в порошках, таблетках, в смывах (с рук, любых поверхностей, с одежды), в растворах и в других объектах исследования) методом иммунохроматографического анализа.

## 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

Для определения наличия МЕТАМФЕТАМИНА в объектах таможенного досмотра (в порошках, таблетках, в смывах (с рук, любых поверхностей, с одежды), и растворах и в других объектах исследования) используется раствор исследуемого материала в буфере, далее именуемый «исследуемый образец».

Определение основано на принципе конкурентного иммунохроматографического анализа. Испытуемый образец всасывается поглощающим участком индикаторной полоски, и в случае наличия в образце метамфетамина, он связывается с антителами к метамфетамину, окрашенными коллоидным золотом. Окрашенный комплекс антитела-метамфетамин движется с фронтом жидкости по мембране. Так как антитела уже связаны с метамфетаминном, они не реагируют с метамфетаминном, нанесенным в виде линии на мембрану, и не образуют розовую линию в тестовой зоне. Несвязавшиеся реагенты образуют только одну розовую линию в зоне контроля. В случае отсутствия в образце метамфетамина, окрашенный комплекс антитела-метамфетамин реагирует с метамфетаминном, нанесенным на мембрану, образуя розовые линии, как в тестовой, так и в контрольной зонах.

## 3. СОСТАВ НАБОРА

- Тест-полоски «ИммуноХром-МЕТАМФЕТАМИН-Экспресс» - 5 шт.
- Ватный тампон на пластиковый ножке (апликатор) в индивидуальной упаковке - 5 шт.
- Пробирка пластиковая с буфером (1 мл.) - 5 шт.
- Инструкция к применению - 1 шт.

## 4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимально определяемая концентрация МЕТАМФЕТАМИНА в приготовленном образце составляет 500 нг/мл. Набор рассчитан на проведение 5-ти определений наличия МЕТАМФЕТАМИНА.

## 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

Набор «ИммуноХром-МЕТАМФЕТАМИН-Экспресс» предназначен только для in vitro диагностики. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются не токсичными.

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор «ИммуноХром-МЕТАМФЕТАМИН-Экспресс» должен храниться при температуре +2-28С в течение всего срока годности 24 мес. Замораживание компонентов набора не допускается. Для получения падежных результатов необходимо строгое соблюдение Инструкции по применению набора.

## 7. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

### При работе с порошками и сыпучим материалом:



1. Смочить ватный тампон аппликатора в пробирке с буфером, отжать его о стенки пробирки.

2. Собрать влажным ватным тампоном аппликатора порошок или другой сыпучий материал и вновь опустить его в пробирку с буфером



3. 1 - 2 минуты размешивать содержимое пробирки аппликатором для более полного растворения.

### При работе с таблетками




1. Измельчить таблетку и поместить в пробирку с буфером



2. 1 – 2 минуты размешивать содержимое пробирки аппликатором с ватным тампоном для более полного растворения.

### При работе со смывами

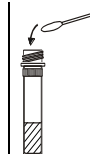

1. Смочить ватный тампон аппликатора в пробирке с буфером, отжать его о стенки пробирки.


2. Собрать влажным ватным тампоном аппликатора порошок или другой сыпучий материал и вновь опустить его в пробирку с буфером



## 8. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Вскрыть упаковку тест-полоски, разрывая её вдоль прорези, извлечь тест-полоску и погрузить её вертикально концом со стрелками до уровня ограничительной линии на 30-60 сек. в пробирку с буфером (с подготовленным, как показано выше, экстрагирующим раствором) и держать там до прохождения жидкости до уровня верхних границ рабочей зоны тест-полоски. (Пакетик с силикагелем-поглотителем влаги – не использовать). Извлечь полоску из пробирки с буфером, положить её на ровную, чистую, сухую поверхность и через 5 минут визуальнo оценить результат реакции.

## 9. ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

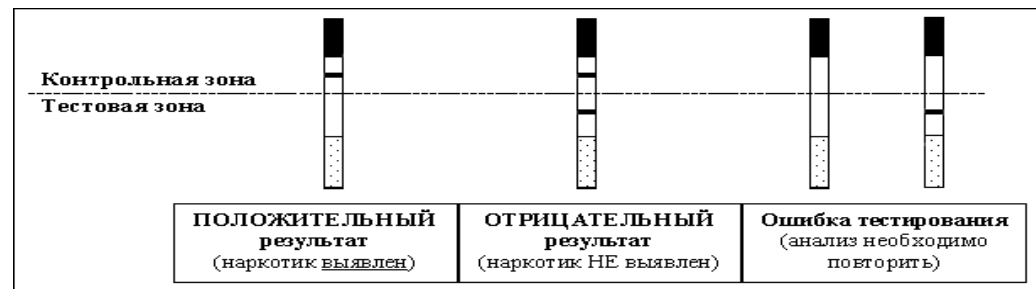

### ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

выявление двух параллельных розовых линий в тестовой и контрольной зонах полоски любой четкости и интенсивности окраски свидетельствует об отрицательном результате анализа

### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

выявление только одной полосы розового цвета любой четкости и интенсивности окраски и полное отсутствие второй полосы в тестовой зоне свидетельствует о положительном результате анализа

### ОШИБКА ТЕСТИРОВАНИЯ:

Если в течение 5 минут полосы не выявляются или появляется только одна полоса в тестовой зоне без полосы в контрольной зоне, результат интерпретировать нельзя. Необходимо повторить тестирование с помощью новой полоски.

**По всем вопросам, касающимся набора «ИммуноХром-МЕТАМФЕТАМИН-Экспресс», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА по адресу: 119313, г.Москва, Ленинский пр-т, д. 88/3.**

**Тел./факс: (499) 138-00-79, 138-16-44, 138-19-91; e-mail: progbio@rol.ru, <http://www.progbio.ru>**