



Тест одностадийный для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина в моче для ранней диагностики беременности (ХГЧ-экспресс-ИХА)

Этот диагностический набор содержит всё необходимое для определения беременности. Тестирование проводится просто, за один прием: достоверный результат получается в течение 5 минут. Диагностирование беременности с помощью «ХГЧ-экспресс-ИХА» можно проводить начиная с первого дня задержки менструации.

Перед тем как приступить к тестированию, ознакомьтесь с компонентами набора.

ВАЖНО:

До использования «ХГЧ-экспресс-ИХА» следует хранить при комнатной температуре (не выше 28⁰С). Не замораживать. Вскрывать защитный пакет только перед проведением анализа. Только для *in vitro* применения, не для внутреннего применения. Набор нельзя использовать повторно.

КАК РАБОТАЕТ ДИАГНОСТИКУМ

После зачатия и наступления беременности в организме женщины продуцируется гормон - хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Секрция этого гормона развивающейся плацентой начинается вскоре после зачатия и возрастает в течение первых трех месяцев, и продолжается на протяжении всей беременности. Выявление ХГЧ в моче является надежным индикатором для ранней диагностики беременности.

Домашний диагностикум «ХГЧ-экспресс-ИХА» - это быстрый анализ для качественного обнаружения ХГЧ в моче. Высокая чувствительность теста обеспечивает диагностику беременности на таком раннем сроке, как первый день задержки менструации и даже за 2-3 дня до ожидаемой менструации.

КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

1. Герметично закрытый защитный пакет, содержащий:

- а) диагностическую стрип-тест-полоску;
- б) пакетик с поглотителем влаги, который позволяет диагностической полоске длительное время храниться в закрытом защитном пакете. Поглотитель влаги непосредственно в диагностировании не используют и его следует выбросить после вскрытия пакет.

2. Емкость (чашечка) для мочи (необязательный компонент).

Содержимое набора позволяет провести одно определение. В определении используется емкость для мочи и диагностическая полоска. Пожалуйста, не вскрывайте защитный пакет до начала проведения анализа.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ АНАЛИЗА

Внимательно прочитайте инструкцию.


Анализ можно проводить в любое время дня, однако рекомендуется использовать первую утреннюю мочу. При беременности концентрация ХГЧ в первой утренней моче наиболее высока.

Приготовьте часы или таймер.

Не используйте тест после истечения срока годности, указанного на упаковке.

СБОР ОБРАЗЦА МОЧИ

Соберите образец мочи в прилагаемую или любую другую чистую емкость. Уровень мочи не должен превышать 1-1,5 см. (или высоту держателя в центре специальной чашечки для мочи). Для проведения анализа потребуется 5 минут. Если у Вас нет времени провести анализ непосредственно после сбора образца мочи, накройте чашку и поместите ее в холодильник, но не более чем на 12 часов. Образец нельзя замораживать. Если образец хранился в холодильнике, то перед проведением анализа согрейте его до комнатной температуры. Это займет около 30 минут. Образец нельзя взбалтывать.

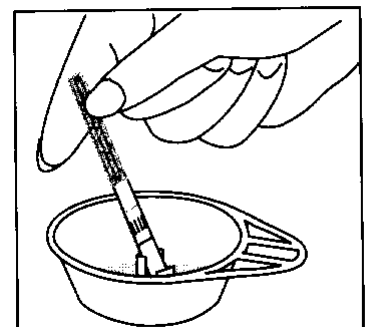

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Выньте стрип-тест-полоску из защитного пакета, разорвав его по “надрезу”.
2. Осторожно опустите на 0,5-1 минуту диагностическую стрип-тест-полоску вертикально в образец мочи, стрелками вниз так, чтобы уровень мочи не превышал линию отмеченную стрелками.
3. Вытащите стрип-тест-полоску из мочи и положите горизонтально на сухую поверхность.
4. В течение 5 минут прочитайте результат.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ


По истечении 5 минут, в зоне контроля проявляется горизонтальная красно-розовая линия, свидетельствующая об окончании анализа. Появление линии в этой зоне свидетельствует о том, что анализ проведен корректно и компоненты теста работоспособны. В тест-зоне считывают результат анализа. Появление второй горизонтальной красно-розовой линии в тест зоне указывает на беременность.

Положительный результат:

проявление двух горизонтальных красно-розовых линий в зоне контроля и тест - зоне означает, что Вы беременны и следует обратиться к врачу.

Отрицательный результат:

проявление только одной горизонтальной красно-розовой линии в зоне контроля означает, что Вы не беременны. И одновременно это служит контролем правильности проведения анализа.

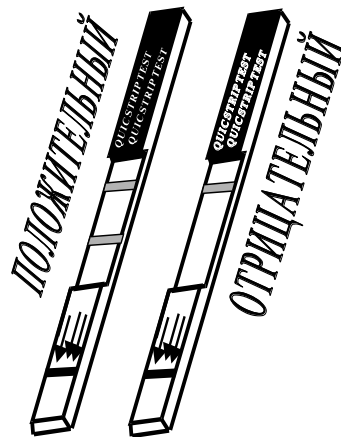

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Вылейте остатки образца мочи в унитаз. Выбросьте компоненты диагностикума в мусоросборник.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Когда можно проводить анализ?

* Если Вы хотите провести анализ в первый день задержки менструации, важно использовать первую утреннюю мочу, так как в первой утренней моче наиболее высокая концентрация ХГЧ. Если задержка менструации продолжается уже неделю или более, использование первой утренней мочи не обязательно, потому что концентрация ХГЧ в этот срок беременности значительно превышает пороговую.

Насколько точен диагностикум «ХГЧ-экспресс-ИХА»?

* Лабораторные испытания показали 100% результат.

Может ли результат быть недостоверным или неправильным?

* Это не должно случиться, если анализ проведен в соответствии с инструкцией. Однако, если почему либо в содержимое пакета до проведения анализа попала влага, то результат нельзя считать достоверным. Некоторые заболевания также могут быть причиной неверного результата. Если у Вас беременность неоднократно определяется нечетко, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Что делать, если результат положительный?

* Рекомендуется повторить анализ через три дня. Если результат окажется положительным, обратитесь к врачу, и он объяснит Вам как действовать дальше. Чем раньше Вы обратитесь к врачу, тем лучше для Вашего здоровья и для здоровья Вашего будущего ребенка.

Что делать в случае, если результат отрицательный?

* Отрицательный результат свидетельствует, что гормон беременности не выявляется, и Вы не беременны. Если в течение недели не начнется менструация, это может означать, что Вы ошиблись в подсчете сроков менструации. Повторите анализ с новым диагностикумом «ХГЧ-экспресс-ИХА». Если повторный анализ даст отрицательный результат, а менструация не наступит, обратитесь к врачу.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

Диагностикум «ХГЧ-экспресс-ИХА» не предназначен для повторного использования. Диагностикум работает только при точном выполнении инструкции. Посоветуйтесь с врачом, если результат Ваших анализов является неожиданным. Некоторые патологии, например опухоли яичников, могут являться причиной неверных результатов. Противозачаточные пилюли, анальгетики, антибиотики и другие распространенные лекарства не влияют на результаты анализа.

По всем вопросам, касающимся полоски «ХГЧ-экспресс-ИХА», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА по адресу: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 88, корп. 3, под.5, офис 100; Телефон/факс: (499)138-00-79, 138-19-91. Приобрести тесты можно через Интернет-магазин: www.domtest.su