


Тест для ранней диагностики беременности в домашних условиях в струе мочи. Инструкция

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Одноразовый тест (ХГЧ-экспресс-ИХА) для определения беременности в формате midstream является быстрым анализатором ранних сроков беременности, основанным на выявлении специфического гормона беременности – хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче. Он относится к тестам на беременность третьего поколения, более совершенный, удобный и комфортный в использовании, обеспечивает гигиеническое выполнение диагностики и точный (99%) результат. В нем заложен принцип иммунохроматографического взаимодействия специфических моноклональных антител, иммобилизованных на поверхности экспресс-теста, с ХГЧ исследуемой мочи. Анализ проводится под струей мочи или путем погружения теста в емкость с мочой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

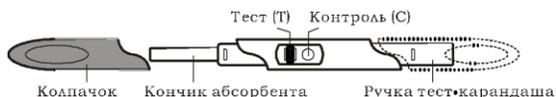

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед тестированием!

- Не используйте тест после истечения срока годности, указанного на индивидуальной упаковке.
- Храните в сухом месте при температуре 2-30°C. Не замораживайте.
- Не используйте, если упаковка разорвана или повреждена.
- Держите в недоступном для детей месте.
- Только для анализа in vitro! Не принимайте внутрь.
- Не открывайте индивидуальный пакетик до тех пор, пока не будете готовы провести тест.
- Выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА

- 2 струйных тест-касет
- 2 белых полиэтиленовых пакетиков
- 2 силикагеля (влагопоглотителя)
- инструкция по применению

ИНСТРУКЦИЯ

1. Вскройте пакетики и извлеките струйный тест. Снимите колпачок и поместите его на ручку теста (см. рисунок выше).
2. Держите тест за ручку с колпачком так, чтобы **открытый кончик абсорбента** был направлен вниз, прямо в поток мочи, минимум в течение 10 секунд, до тех пор, пока он полностью не промокнет (см. рисунок справа).



ВНИМАНИЕ: Избегайте попадания мочи на окна **Тести Контроль**. По желанию вы можете собрать мочу в чистую и сухую емкость, после чего погрузить в мочу только **кончик абсорбента** теста минимум на 10 секунд.

3. Выньте из мочи тест сразу же наденьте **колпачок** на **кончик абсорбента**; положите тест на плоскую поверхность так, чтобы окна **Тести Контроль** были обращены вверх. После этого начните отсчет времени.
4. Как только процесс теста начнется, вы можете заметить движение светового индикатора в окнах **Тести Контроль**. Через 3 минуты вы сможете прочесть результат. Если цветная полоса не появится, подождите еще минуту. Некоторые положительные результаты появляются уже через 1 минуту и даже быстрее – в зависимости от концентрации ХГЧ.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

БЕРЕМЕННА

Появляются две полосы определенного цвета. Одна линия – в Контрольном Окне (С), вторая – в Тестовом Окне (Т). Одна полоса может быть светлее другой; они обязательно одинаковы. Это значит, **Вы беременны**.

НЕ БЕРЕМЕННА

Появляется одна полоса – в Контрольном Окне (С). В Тестовом Окне (Т) полоса не будет. Это значит: **Вы не беременны**.

РЕЗУЛЬТАТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Результат не действителен, если не видно цветной полоски ни в Контрольном Окне (С), ни в Тестовом Окне (Т), а также если она появится в Тестовом Окне (Т). Повторите тест, используя новый тест и точно соблюдайте инструкцию.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Существует вероятность, что тест даст неверные результаты. Прежде чем принимать решения, имеющие медицинское значение, обратитесь к врачу.

1. Препараты, содержащие ХГЧ (прегнил, профази, пергонали АПЛ) могут дать ложные положительные результаты. При этом алкоголь, оральные контрацептивы, обезболивающие средства, антибиотики и средства гормонального лечения повлияют на результат не могут.
2. Ряд медицинских условий (помимо беременности), включая кисту яичника или гормонально активные опухоли, могут привести к повышению содержания ХГЧ, что может дать ложный положительный результат.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. В: Как работает тест?

О: Одноразовый тест на беременность ранней диагностики выявляет в Вашей моче гормон, вырабатываемый Вашим организмом во время беременности (хорионический гонадотропин человека – ХГЧ). По мере развития беременности содержание ХГЧ растет.

2. В: Если я запоздало узнаю о беременности, как скоро я смогу провести тест?

О: Вы можете провести тест с первой мочой утром, сразу после пробуждения, в любое время дня. При этом (если Вы действительно беременны) максимальное содержание гормона беременности в моче – утренние часы.

3. В: Можно ли проводить тест при первом утреннем мочеиспускании?

О: Хотя Вы можете проводить тест в любое время, именно первая утренняя моча содержит наибольшее количество ХГЧ за день.

4. В: Насколько точен тест?

О: Клиническая оценка была проведена с целью сравнения результатов, полученных при проведении Одноразового Теста Беременность Ранней Диагностики и еще одного мембранного ХГЧ-теста, набор для которого доступен в продаже. Клиническое испытание включало себя 100 образцов мочи: оба анализа дали 75 положительных и 25 отрицательных результатов. Результаты продемонстрировали >99% общей точности Одноразового Теста Беременность Ранней Диагностики в сравнении с другим мочевым мембранным ХГЧ-тестом.

5. В: Насколько чувствителен тест?

О: Одноразовый Тест на Беременность Ранней Диагностики выявляет ХГЧ в моче при концентрации 25 мМЕ/мл и выше. Тест приведен в соответствие с Международным Стандартом ВОЗ. Добавление LH (300 мМЕ/мл), FSH (1.000 мМЕ/мл) и TSH (1.000 мМЕ/мл) «отрицательным» (0 мМЕ/мл ХГЧ) и «положительным» (25 мМЕ/мл ХГЧ) образцам не оказало никакой перекрестной реактивности.

6. В: Что мне делать, если тест покажет, что я беременна?

О: Это значит, что Ваша моча содержит ХГЧ, и что Вы беременны. Для подтверждения наличия беременности обратитесь к врачу, обсудите с ним шаги, которые Вы намерены предпринять.

7. В: Как мне определить, правильно ли прошел тест?

О: Появление цветной полоски в контрольном окне (С) подскажет Вам, что Вы правильно провели процедуру, и что было поглощено правильное количество мочи.

8. В: Что мне делать, если тест покажет, что я не беременна?

О: Это значит, что в Вашей моче содержание ХГЧ не обнаружено, и что Вы, вероятно, не беременны. Если в течение недели после наступления срока у Вас не начнутся месячные, повторите тест с новым тестовым материалом. Если после повторного теста результат будет тот же, а месячные у Вас не начнутся, обратитесь к врачу.

Мы будем признательны, если Вы предпримете следующие шаги к тому, чтобы Ваша беременность прошла успешной без осложнений, и чтобы Вас родил здоровый ребенок:

1. Проводите Одноразовый Тест на Беременность Ранней Диагностики в случае задержки месячных. Это поможет Вам начать заботиться о здоровье будущего ребенка, как только Вы узнаете о беременности.
2. Если Ваш результат будет положительным, советуем Вам обратиться к врачу сразу же, чтобы Ваш ребенок родился здоровым.
3. Питайтесь рационально, бросьте курить и сократите потребление алкоголя.

По всем вопросам касающимся экспресс-теста «ХГЧ-экспресс-ИХА», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА г. Москва, Ленинский проспект, д.88 корп.3 оф. 100

Тел./факс (499)138-00-79, (499)138-16-44, (499)138-19-91 e-mail: med@progbio.ru www.progbio.ru
Также приобрести тесты можно через Интернет-магазин www.domtest.sue e-mail: info@domtest.su тел. (495)723-24-66

Мы также предлагаем другие варианты тестов на беременность:

