

## Тест одностадийный для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина человека в моче для ранней диагностики беременности

### (ХГЧ-экспресс-ИХА)

Этот диагностический набор содержит всё необходимое для определения беременности. Тестирование проводится просто, за один прием: достоверный результат получается в течение 5 минут. Диагностирование беременности с помощью «ХГЧ-экспресс-ИХА» можно проводить, начиная с первого дня задержки менструации. Для большей уверенности мы предлагаем упаковку содержащую комплект из двух тест – полосок. Второе, контрольное тестирование позволит снять психологическое сомнение, иногда возникающее у женщин. Перед тем как приступить к тестированию, ознакомьтесь с компонентами набора. **ВАЖНО: До использования «ХГЧ-экспресс-ИХА» следует хранить при комнатной температуре (не выше 28°C). Не замораживать. Вскрывать защитный пакет только перед проведением анализа. Только для invitro применения, не для внутреннего применения. Набор нельзя использовать повторно.**

#### ПРИНЦИП РАБОТЫ

После зачатия и наступления беременности в организме женщины продуцируется гормон - хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Секреция этого гормона развивающейся плацентой начинается вскоре после зачатия и возрастает в течение первых трех месяцев, и продолжается на протяжении всей беременности. Выявление ХГЧ в моче является надежным индикатором для ранней диагностики беременности.

Домашний тест «ХГЧ-экспресс-ИХА» - это быстрый анализ для качественного обнаружения ХГЧ в моче. Высокая чувствительность теста обеспечивает диагностику беременности на таком раннем сроке, как первый день задержки менструации и даже за 2-3 дня до ожидаемой менструации.



#### КОМПОНЕНТЫ НАБОРА


1. Два герметично закрытых защитных пакета, содержащих:
  - а) диагностическую стрип-тест-полоску;
  - б) пакетик с поглотителем влаги, который позволяет диагностической полоске длительное время храниться в закрытом защитном пакете. Поглотитель влаги непосредственно в диагностировании не используют, и его следует выбросить после вскрытия пакета.
2. Инструкция

#### ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ АНАЛИЗА

Внимательно прочитайте инструкцию. Анализ можно проводить в любое время дня, однако рекомендуется использовать первую утреннюю мочу. При беременности концентрация ХГЧ в первой утренней моче наиболее высока. Не используйте тест после истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### СБОР ОБРАЗЦА МОЧИ

Соберите образец мочи в прилагаемую или любую другую чистую емкость. Уровень мочи не должен превышать 1-1,5 см. (или высоту держателя в центре специальной чашечки для мочи). Для проведения анализа потребуется 5 минут. Если у Вас нет времени провести анализ непосредственно после сбора образца мочи, накройте чашку и поместите ее в холодильник, но не более чем на 12 часов. Образец нельзя замораживать. Если образец хранился в холодильнике, то перед проведением анализа согрейте его до комнатной температуры. Это займет около 30 минут. Образец нельзя взбалтывать.

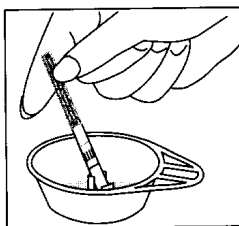

#### ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките стрип-тест-полоску из защитного пакета, разорвав его по “надрезу”.
2. Осторожно опустите на 0,5-1 минуту диагностическую стрип-тест-полоску вертикально в образец мочи, стрелками вниз так, чтобы уровень мочи не превышал линию отмеченную стрелками.
3. Вытащите стрип-тест-полоску из мочи и положите горизонтально на сухую поверхность.
4. В течение 5 минут просчитайте результат.

#### ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

По истечении 5 минут, в зоне контроля проявляется горизонтальная красно-розовая линия, свидетельствующая об окончании анализа. Появление линии в этой зоне свидетельствует о том, что анализ проведен корректно и компоненты теста работоспособны. В тест-зоне считывают результат анализа. Появление второй горизонтальной красно-розовой линии в тест зоне указывает на беременность.

#### Положительный результат:


*проявление двух горизонтальных красно-розовых линий в зоне контроля и тест - зоне означает, что Вы беременны и следует обратиться к врачу.*

#### Отрицательный результат:

*проявление только одной горизонтальной красно-розовой линии в зоне контроля означает, что Вы не беременны. И одновременно это служит контролем правильности проведения анализа.*

#### Ошибка тестирования:

*Если в течении 5 минут полосы не выявляются или появляется только одна полоса в тестовой зоне без полосы в контрольной зоне, результат интерпретировать нельзя. Необходимо повторить тестирование с помощью новой полоски.*

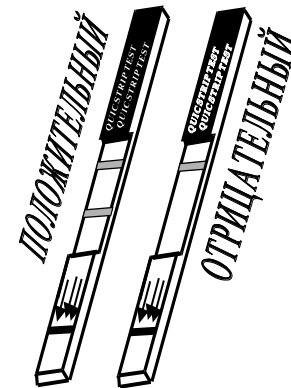

#### ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

##### 1. В: Как работает тест?

О: Одноразовый тест на беременность ранней диагностики выявляет в Вашей моче гормон, вырабатываемый Вашим организмом во время беременности (хорионический гонадотропин человека – ХГЧ). По мере развития беременности содержание ХГЧ растет.

##### 2. В: Если я подозреваю себя беременной, как скоро я смогу провести тест?

О: Вы можете провести тест в свой мочу уже в первый день задержки месячных, в любое время дня.

Мы будем признательны, если Вы предпримите следующие шаги к тому, чтобы Ваша беременность прошла успешно и без осложнений, и у Вас родился здоровый ребенок.

1. Проводите тест на диагностику ранней Беременности в случае задержки месячных. Это поможет Вам начать заботиться о здоровье будущего ребенка, как только Вы узнаете о беременности.
2. Если Ваш результат будет положительным, советуем Вам обратиться к врачу.
3. Питайтесь рационально, бросьте курить и сократите употребление алкоголя.

По всем вопросам касающимся экспресс-теста «ХГЧ-экспресс-ИХА», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА г. Москва, Ленинский проспект, д.88 корп.3 оф. 100 Тел./факс (499)138-00-79, (499)138-16-44, (499)138-19-91 e-mail: [med@progbio.ru](mailto:med@progbio.ru) [www.progbio.ru](http://www.progbio.ru) Также приобрести тесты можно через Интернет-магазин [www.domtest.sue](http://www.domtest.sue) e-mail: [info@domtest.su](mailto:info@domtest.su) тел. (495)723-24-66

Мы также предлагаем другие варианты тестов на беременность:

